

## INSPECCIÓN

Durante el reprocesamiento de instrumental hay que inspeccionar tanto las características estructurales como las funcionales y estas deberán ser puestas a prueba para asegurar la funcionalidad del producto.

- Sólo instrumentos que funcionan perfectamente deberán ser puestos a disposición del médico .
- DIN EN ISO 17 664

### Reglas generales:

Chequeo visual para la limpieza significa:

- Ausencia de sangre, proteínas y otros residuos orgánicos
- Utilizar lupa
- Áreas a ser revisadas con especial cuidado: articulaciones, partes cerradas, uniones y lúmenes tubulares permeables
- Revisión visual de posibles daños: ej. Fisuras, fracturas, deformaciones, signos de roce y fricción
- Instrumentos particularmente finos y delicados deberán ser chequeados bajo lupa
- Inspección visual de cambios en la superficie: decoloración y corrosión, daño en la superficie de cromo o níquel



Fig. 1.- Instrumental sucio



Fig. 2.- Restos de sangre incrustadas Sobre los instrumentos



Fig. 3.- Inspección del instrumental



Fig. 4.- Tijeras con fricción por corrosión